

СВІТЛОДІЮДНА LED ТЕРАПІЯ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА

7 КОЛЬОРІВ

ЧЕРВОНИЙ	
СИНІЙ	
ЗЕЛЕНИЙ	
ЖОВТИЙ	
ФІОЛЕТОВИЙ	
БЛАКИТНИЙ	
КОМБО	



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

1. Вступ

1.1 Загальна інформація

Цей апарат розроблений відповідно до вимог міжнародних нормативів безпеки, зручності у використанні.

2. Заходи безпеки



Увага: прочитайте інструкцію перед використанням апарата.

Посібник користувача містить інструкцію з використання апарата, інформацію про запобіжні заходи, технічне обслуговування та гарантії. Задля безпеки ознайомтеся з ним перед використанням.

2.1 Загальні відомості

- 1) Перед використанням апарата необхідно перевірити корпус та світлодіоди на наявність механічних підтверджень.
- 2) При використанні апарата слід уникати високої температури, підвищеної вологості та прямих сонячних променів, краще встановлювати його в приміщенні з хорошою вентиляцією.
- 3) Рекомендована температура при запуску: 0–26 °C
- 4) Рекомендована температура зберігання: 0–35 °C.
- 5) Відносна вологість: менше 80%
- 6) Будь ласка, встановіть апарат на рівній поверхні.
- 7) Цей інструмент також може отримати серйозні пошкодження при слабкому ударі, пересувайте його повільно.

2.2 Запобіжні заходи, пов'язані з електроживленням

- 1) Не використовуйте апарат поблизу нагрівальних приладів.
- 2) Подбайте, щоб вода не потрапляла у пристрій. Струм високої напруги через вологу може спричинити загоряння або ураження електричним струмом.
- 3) Не використовуйте пошкоджену вилку або розетку.
- 4) Вимикайте живлення, якщо не використовуєте апарат упродовж тривалого часу.
- 5) Якщо в апараті є волога, чути нехарактерний звук, запах гару або присутні інші сторонні явища, відключіть живлення.

2.3 Запобіжні заходи від займання

- 1) Не кладіть легkozаймисті або горючі матеріали на апарат або поблизу нього.
- 2) Не накривайте апарат під час його використання.

2.4 Запобіжні заходи при очищенні

- 1) У разі забруднення корпусу, відключіть живлення та обережно протріть його м'якою тканиною.
- 2) Уникайте потрапляння води на корпус апарата.

2.5 Протипоказання до терапії

- новоутворення;
- наявність в анамнезі гістологічно виявленої злоякісної карциноми;
- гіпертермія;
- опромінення області шиї при гіпертиреозі;
- гіперфункція щитовидної залози та фотопатології (порфірія, прийом фотосенсибілізаторів);
- активна форма туберкульозу;
- епілепсія;
- вплив на очі;
- вплив на живіт під час вагітності;
- виражена серцева недостатність;
- гіпертонічна хвороба I – III стадії;
- захворювання крові;
- різке виснаження.

3. Зовнішній вигляд апарата




4. Встановлення та включення

- 4.1 Встановіть пристрій на рівну поверхню.
- 4.2 Підключіть блок живлення до роз'єму.
- 4.3 Щоб увімкнути апарат, натисніть кнопку увімкнення (положення I (ON)).

5. Налаштування параметрів LED терапії

- 5.1 Використовуючи кнопки ⑤ / ⑥ / ⑦ , оберіть необхідний колір LED терапії та встановіть рівень яскравості світлодіодів від 0 до 10 для кожного кольору. Порядок зміни рівня: 0→1→2→3...10 → 9 → 8→7...0.
- Таблиця кольорів світлодіодів наведена нижче.
- 5.2 За допомогою кнопки ⑧ встановіть необхідний час тривалості процедури LED терапії. Мінімальний час 5 хвилин, максимальний час 60 хвилин. Крок натискання 5 хвилин.
- 5.3 Натисніть кнопку ⑨ , щоб розпочати процедуру LED терапії. На дисплеї позначки часу ④ з'явиться миготлива точка, що інформує про статус початку процедури. Після закінчення часу точка зникне. Пристрій автоматично зупиниться. Встановлені налаштування залишаються для подальшого використання або коригування.
- 5.4 Натисніть кнопку ⑨ , щоб передчасно завершити процедуру LED терапії.
- 5.5 Після закінчення процедури вимкніть апарат, вийміть блок живлення з розетки.

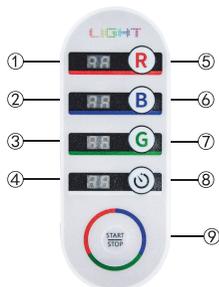

Панель управління

Дисплей	
①	ЧЕРВОНИЙ індикатор рівня світлодіодів
②	СИНИЙ індикатор рівня світлодіодів
③	ЗЕЛЕНИЙ індикатор рівня світлодіодів
④	Індикатор часу
Кнопки	
⑤	R ЧЕРВОНИЙ регулювання рівня світлодіодів
⑥	B СИНИЙ регулювання рівня світлодіодів
⑦	G ЗЕЛЕНИЙ регулювання рівня світлодіодів
⑧	Регулювання часу
⑨	Старт / Стоп

6. Колір світлодіода

6.1 Режими для світлодіода

КОЛО КОЛЬОРІВ RGB



КОЛІР		ДОВЖИНА ХВИЛІ	ПРИЗНАЧЕННЯ
R ЧЕРВОНИЙ	●	625 нм	<ul style="list-style-type: none"> – Лікування підгострих і хронічних запальних захворювань шкіри (атопічний дерматит, акне, розацеа, псоріаз), рани, що довго не загоюються, сверблячі дерматози – Зменшення виразності зморшок, підвищення еластичності шкіри, уповільнення процесів старіння шкіри, покращення мікроциркуляції – Лікування алопеції
B СИНИЙ	●	415 нм	<ul style="list-style-type: none"> – Антисептичний ефект при акне – порфірини поглинають синє світло і збуджуються з подальшим вивільненням активних форм кисню, що призводить до загибелі бактеріальної клітини – Пригнічує проліферацію себоцитів
G ЗЕЛЕНИЙ	●	520 нм	<ul style="list-style-type: none"> Знімає подразнення, зменшує еритему, знеболює, знімає напругу
R+B ФІОЛЕТОВИЙ	●	625+415 нм	<ul style="list-style-type: none"> – Зниження рівня меланіну – лікування гіперпігментації – Догляд за втомленою, старіючою шкірою
R+G ЖОВТИЙ	●	625+520 нм	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес, лімфодренаж, порушення мікроциркуляції
B+G БЛАКИТНИЙ	●	415+520 нм	<ul style="list-style-type: none"> Догляд за сухою шкірою, забезпечує тривале збереження вологи, релакс процедура
R+B+G КОМБО ЧЕРВОНИЙ+ СИНИЙ+ЗЕЛЕНИЙ	●	625+415+520 нм	<ul style="list-style-type: none"> – Поперемінне ввімкнення забезпечує різнобічний потужний ефект, підсумовує дію всіх кольорів. – Ідеально підходить для складних ситуацій – вікова чутлива шкіра з пізнім акне, розацеа + антивіковий ефект

7. Технічне обслуговування

7.1 Очищення

Використовуйте м'які тканини для протирання панелі управління, корпусу апарата.

7.2 Зберігання

Зберігайте апарат у складеному положенні в сухому приміщенні.



Відкрите положення



Складене положення

8. Технічні характеристики

ТОРГОВА МАРКА	Beautyhall
К-СТЬ СВІТЛОДІОДІВ	292
ПОТУЖНІСТЬ	DC24V 4A 50 Гц / 60 Гц
КОЛІР СВІТЛОДІОДА	Червоний / Синій / Зелений / Жовтий / Фіолетовий / Блакитний / Комбо
РОЗМІРИ (Ш *Д*В)	473x484x343 (мм)
ВАГА	4,5 кг ± 10%
МАТЕРІАЛ КОРПУСА	Пластик
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ	Китай

9. Гарантія

9.1 Гарантія 12 місяців з моменту його купівлі, в разі виробничих дефектів.

9.2 Гарантійне обслуговування можливе лише за наявності чека, що підтверджує покупку та гарантійного талона, заповненого належним чином. Гарантійний талон знаходиться всередині коробки.

9.3 Гарантія не надається:

- у разі випадкового пошкодження;
- неналежного використання чи недбалості;
- у разі змін або ремонту, виконаних неуповноваженим персоналом;
- при попаданні води чи інших рідин усередину апарата.

СВЕТОДИОДНАЯ LED ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

7 ЦВЕТОВ

КРАСНЫЙ	
СИНИЙ	
ЗЕЛЁНЫЙ	
ЖЁЛТЫЙ	
ФИОЛЕТОВЫЙ	
ГОЛУБОЙ	
КОМБО	



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Введение

1.1 Общая информация

Этот аппарат разработан в соответствии с требованиями международных нормативов безопасности, удобства в использовании.

2. Меры безопасности



Внимание: прочтите инструкцию перед использованием аппарата.

Руководство пользователя содержит инструкцию по использованию аппарата, информацию о мерах предосторожности, техническом обслуживании и гарантии. В целях безопасности ознакомьтесь с ним перед использованием.

2.1 Общие сведения

- 1) Перед использованием аппарата необходимо проверить корпус и светодиоды на предмет механических повреждений.
- 2) При использовании аппарата следует избегать высокой температуры, повышенной влажности и прямых солнечных лучей, лучше устанавливать его в помещении с хорошей вентиляцией.
- 3) Рекомендуемая температура при запуске: 0-26 ° C
- 4) Рекомендуемая температура хранения: 0-35 ° C.
- 5) Относительная влажность: менее 80%
- 6) Пожалуйста, установите аппарат на ровной поверхности.
- 7) Этот аппарат также может получить серьезные повреждения при слабом ударе, перемещайте его медленно и аккуратно.

2.2 Меры предосторожности, связанные с электропитанием

- 1) Не используйте аппарат вблизи нагревательных приборов.
- 2) Позаботьтесь, чтобы вода не попадала в устройство. Ток высокого напряжения из-за влаги может вызвать возгорание или поражение электрическим током.
- 3) Не используйте поврежденную вилку или розетку.
- 4) Отключайте питание, если не используете аппарат в течении длительного времени.
- 5) Если в аппарате присутствует влага, слышен нехарактерный звук, запах гари или присутствуют другие посторонние явления, отключите питание.

2.3 Меры предосторожности от возгорания

- 1) Не кладите легковоспламеняющиеся или горючие материалы на аппарат или вблизи его.
- 2) Не накрывайте аппарат при его использовании.

2.4 Меры предосторожности при очистке

- 1) В случае загрязнения корпуса, отключите питание и осторожно протрите его мягкой тканью.
- 2) Избегайте попадания воды на корпус аппарата.

2.5 Противопоказания к терапии

- новообразование;
- наличие в анамнезе гистологически выявленной злокачественной карциномы;
- гипертермия;
- облучение области шеи при гипертиреозе;
- гиперфункция щитовидной железы и фотопатологии (порфирия, прием фотосенсибилизаторов);
- активная форма туберкулеза;
- эпилепсия;
- воздействия на глаза;
- воздействие на живот во время беременности;
- выраженная сердечная недостаточность;
- гипертоническая болезнь I - III стадии;
- заболевания крови;
- резкое истощение.

3. Внешний вид аппарата


Разъем блока питания Кнопка включения/выключения



LED панель



Складываемые части

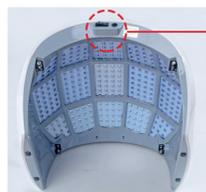

Разъем блока питания и кнопка включения/выключения



Сложенное положение



Блок питания



Защитные очки

4. Установка и включение

4.1 Установите аппарат на ровную поверхность.

4.2 Подсоедините блок питания к разъему.

4.3 Для включения аппарата нажмите кнопку включения (положение I (ON)).

5. Настройка параметров LED терапии

5.1 Используя кнопки ⑤/⑥/⑦, выберите необходимый цвет LED терапии и установите уровень яркости светодиодов от 0 до 10 для каждого цвета.

Порядок смены уровня: 0 → 1 → 2 → 3...10 → 9 → 8 → 7...0.


Таблица цветов светодиодов приведена ниже.

5.2 Используя кнопку ⑧, установите необходимое время длительности процедуры LED терапии. Минимальное время 5 минут, максимальное время 60 минут. Шаг нажатия 5 минут.

5.3 Нажмите кнопку ⑨ для начала процедуры LED терапии. На дисплее отметки времени ④ появится мигающая точка, информирующая о статусе начала процедуры. По истечению времени точка исчезнет. Устройство автоматически остановится. Установленные настройки останутся для последующего использования или корректировки.

5.4 Нажмите кнопку ⑨ для преждевременного окончания процедуры LED терапии.

5.5 По окончании процедуры выключите аппарат, выньте блок питания из розетки.

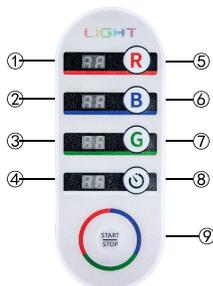

Панель управления

Дисплей	
①	КРАСНЫЙ индикатор уровня светодиодов
②	СИНИЙ индикатор уровня светодиодов
③	ЗЕЛЁНЫЙ индикатор уровня светодиодов
④	Индикатор времени
Кнопки	
⑤	КРАСНЫЙ регулировка уровня светодиодов
⑥	СИНИЙ регулировка уровня светодиодов
⑦	ЗЕЛЁНЫЙ регулировка уровня светодиодов
⑧	Регулировка времени
⑨	Старт / Стоп

6. Цвет светодиода

6.1 Режимы для светодиода

ЦВЕТОВОЙ КРУГ RGB



ЦВЕТ	ДЛИНА ВОЛНЫ	НАЗНАЧЕНИЕ
R КРАСНЫЙ	625 нм	–Лечение подострых и хронических воспалительных заболеваний кожи (атопический дерматит, акне, розацеа, псориаз), длительно незаживающие раны, зудящие дерматозы – Уменьшение выраженности морщин, повышение эластичность кожи, замедление процессов старения кожи, улучшению микроциркуляции – Лечение алопеции
B СИНИЙ	415 нм	– Антисептический эффект при акне - порфирины поглощают синий свет и возбуждаются с последующим высвобождением активных форм кислорода, что приводит к гибели бактериальной клетки – Подавляет пролиферацию себоцитов
G ЗЕЛЁНЫЙ	520 нм	Снимает раздражение, уменьшает эритему, обезболивает, снимает напряжение
R+B ФИОЛЕТОВЫЙ	625+415 нм	–Снижение уровня меланина - лечение гиперпигментации – Уход за уставшей, стареющей кожей
R+G ЖЁЛТЫЙ	625+520 нм	Антистресс, лимфодренаж, нарушение микроциркуляции
B+G ГОЛУБОЙ	415+520 нм	Уход за сухой кожей, обеспечивает длительное сохранение влаги, релакс процедура
R+B+G КОМБО КРАСНЫЙ+ СИНИЙ+ЗЕЛЕНЫЙ	625+415+520 нм	–Попеременное включение обеспечивает разносторонний мощный эффект, суммирует действие всех цветов. –Идеально подходит для сложных ситуаций – возрастная чувствительная кожа с поздним акне, розацеа + антивозрастной эффект

7. Техническое обслуживание

7.1 Очистка

Используйте мягкие ткани для протирания панели управления, корпуса аппарата.

7.2 Хранение

Храните аппарат в сложенном положении в сухом помещении.



Открытое положение



Сложенное положение

8. Технические характеристики

ТОРГОВАЯ МАРКА	Beautyhall
КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ	292
МОЩНОСТЬ	DC24V 4A 50 Гц / 60 Гц
ЦВЕТ СВЕТОДИОДА	Красный / Синий / Зеленый / Жёлтый / Фиолетовый / Голубой / Комбо
РАЗМЕРЫ (Ш*Д*В)	473x484x343 (мм)
ВЕС	4,5 кг ± 10%
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Пластик
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ	Китай

9. Гарантия

9.1 Гарантия 12 месяцев с момента его покупки, в случае производственных дефектов.

9.2 Гарантийное обслуживание возможно только при наличии чека, подтверждающего покупку и гарантийного талона, заполненного надлежащим образом. Гарантийный талон находится внутри коробки.

9.3 Гарантия не предоставляется:

- в случае случайного повреждения;
- ненадлежащего использования или небрежности;
- в случае изменений или ремонта, выполненных неуполномоченным персоналом;
- при попадании воды или других жидкостей внутрь аппарата.